



SOP PEMAKAIAN INFANT WARMER FISHER PAYKEL

Nomor Dokumen	: 001/SOP/Laboratorium	Tanggal Pembuatan	: 10 Desember 2015
Status Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 1

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
Ka. Laboratorium	Gugus Kendali Mutu	Ka. Prodi

Pengertian : Suatu alat untuk tempat merawat bayi baru lahir dimana bayi tetap terjaga kehangatannya

Tujuan : Untuk mencapai stabilisasi suhu tubuh bayi baru lahir serta memudahkan dalam melakukan tindakan

Prosedur :

1. Cuci tangan
2. Infant Warmer sudah dalam keadaan siap pakai
3. Hubungkan infant warmer dengan saluran listrik
4. Tekan tombol on
5. Tekan light bila diperlukan untuk penerangan
6. Apabila bayi belum lahir, tekan tombol prewarm (25%) untuk permulaan pemanasan
7. Apabila menginginkan suhu lebih panas tekan tombol manual dan suhu bisa diatur sesuai dengan yang diinginkan
8. Tekan menu baby bila menggunakan probe suhu bayi dan suhu juga bisa diatur sesuai dengan yang diharapkan
9. Lakukan dekontaminasi setiap hari dengan menggunakan larutan klorin 0,5%